

松風歯科クラブ
 会員さま向け情報誌
 季刊/2015年1月発行

ha·ha·ha

Vol. 64 冬号

ご覧いただき、ぜひ皆さままでお楽しみください。

謹んで新年のご挨拶を
 申し上げます。

本年も松風は、皆さまの健康と幸せを願い、
 世界の歯科医療に貢献してまいります。

- 2 歯科用多目的超音波治療器 超音波スケーラ
 ビエゾン150/250 新製品
- 5 光重合型矯正用接着材
 ビューティオーソ ボンドⅡ 新製品
- 6 2014年発売の新製品
- 10 おすすめチラシ
 松風ブロック HC CAD/CAM用支台歯形成のポイント(小臼歯)
- 11 使い方のコツとQ&A その60
 Mtwoファイル
- 12 ビューティフィル E ポステリア / MICDインストゥルメント
 VOICE / Vol.65 大久保 恵子 先生
- 14 チョット歯拝見 / 古都爽風
 陶板画家 SIONEブランドデザイナー 河原 尚子 さん
- 16 MICD SMILE CIRCLE MEMBER インタビュー
 Vol.13 丸田 忠勝 先生
- 18 Giomerサイト活用のすすめ
- 19 Giomer製品のご紹介
- 20 松風歯科衛生士がお届けする
 Dental Hygienist 通信
- 22 院内用ポスター&リーフレット・リーフレットスタンドのご紹介
- 25 技工の達人 / モデリングリキッド&セラレジソンド
- 26 キャンペーンのお知らせ
- 28 2015年度自動継続入会のお知らせ 重要
- 29 イベントカレンダー
- 30 読者アンケート&プレゼント



Voice

Vol.65

SHOFU PRODUCTS USER'S REPORT

歯科充填用コンポジットレジン

ビューティフィル E ポステリア

歯科用充填器

MiCDインストゥルメント

歯を綺麗にする価値観の提供。
その選択肢の1つであるダイレクトボンディング。



京都府京都市 おおくぼ歯科クリニック
院長 大久保 恵子 先生
松風歯科クラブ会員No.113165

京都市左京区の下鴨は、京都盆地北東部の賀茂川と高野川が合流する地点の北側に広がり、下鴨神社などの寺社や大学、植物園などの文教施設が多くある、歴史深く四季豊かな地域です。京都市街地を南北に流れる鴨川は、今も大都市にありながら、憩いの場として多くの人に親しまれています。さて、「賀茂川」と「鴨川」で異なる名称を使用していることにお気づきでしょうか。総称は「鴨川」

ですが、通称として高野川と合流するまでの上流は「賀茂川」、合流してからの下流は「鴨川」と呼ばれています。これに伴い、世界遺産である下鴨神社と上賀茂神社も異なる漢字が使用されています（※諸説あり）。今回は、京都の自然や文化に触れ合える下鴨地域にご開業のおおくぼ歯科クリニック 大久保恵子先生に、健保適用外のコンポジットレジン「ビューティフィル E ポステリア」と充填器「MiCDインストゥルメント」についてお話を伺いました。

おおくぼ歯科クリニック

歯科医師5人、歯科衛生士6人、歯科助手2人、受付2人、カウンセリング1人
ホームページ <http://www.okubodental.com/>

自費診療を行うにあたって、治療方針について教えてください。

当クリニックでは、再治療が必要にならないように「トータル的に歯を大切にすること」をコンセプトにしています。その中で、コンポジットレジン（以下CR）修復に焦点を当てて考えてみると、保険診療と自費診療の線引きの基準は材料ではないと考えています。大げさな言い方になってしまいますが、その基準は価値の創造だと考えています。歯科治療には、「最小限の侵襲で最大限の効果」というMIの基本的なコンセプトがありますが、その考え方が歯を大切にすることに繋がります。「詰める」という作業一つ取り上げても、数分で完了させることもできますし、1時間かけて解剖学的形態を忠実に再現して完了させることもできます。後者の場合、そこには「修復という治療だけではなく、付加価値も提供している」という意味が存在しています。歯を大切にするという価値観に共感していただける患者さまは多くおられるので、その付加価値を理解していただくのは、難しい話ではないと思います。例えば、前歯の補綴物を考えるとき、前装冠にするのか、メタルボンドにするのか…そういうことではなく、どのようにすれば笑っ

たときに美しく見えるのか、患者さまが喜ばれるのか、そのような点を大切にしながら、治療方法や材料を決めています。その結果、保険診療になるのか、自費診療になるのか、ということです。

その中でビューティフィル E ポステリアを採用されたきっかけを教えてください。

健保適用外のCRは以前から使用していましたが、松風社の方にすすめられたのがきっかけで、ビューティフィル E ポステリアを使用するようになりました。使い始めて1年半ほどになりますが、とても操作性がよいですね。とくに、ペースト性状が適正な粘度なので、今まで使用したものと比較すると、インストゥルメント離れがよいだけでなく、温度も湿度も高い口腔内でも付与した形態を保ってくれます。また、当クリニックではチップタイプを使用していますが、患者さま一人ひとりに常に清潔な材料を使えるということは、感染予防の観点からもとてもメリットを感じています。加えて、Giomar（ジャイオマー）®製品であることも魅力の一つだと思います。Giomarのコンセプトにはとても共感できます。Giomar製品であれば材料による付加価値も提供できると考えます。

Giomar製品のどのような点に共感を持たれたのでしょうか。

Giomarという言葉を知ったのは、今から1年半ほど前です。松風社の講習会や、講習会に参加された先生からの推薦もあり、Giomar製品を使用するようになりました。先ほど価値観というお話をしましたが、その価値観に合った材料を選択する必要があると思います。松風社が開発したGiomar製品は、当クリニックのコンセプトに合った材料なので、同じCRであればGiomar製品を選択しています。なお、ビューティフィル E ポステリアを使用した症例の予後は良好で、現

在のところ、二次カリエスや破折などの再治療が必要となったケースはありません。

MiCDインストゥルメントをご使用になられていかがでしたか。

ダイレクトボンディングの症例では、ビューティフィル E ポステリアと組み合わせで使用しています。MiCDインストゥルメントキットがあれば、他のインストゥルメントを使用する必要はありません。#3はCR充填の際に必ず使用します。非常に薄いので、コンタクト部の形態を付与する際には、とても重宝します。また、#4の杵状部分でCRを圧接することで、コンタクト部や咬合面に気泡が入らないようにしています。この4種類の中でも、とくに#1の形が使いやすいので、気に入っています。#1の形態は屈曲の角度が絶妙で、これほど先端が細いものはこれまでにありませんでした。ビューティフィル E ポステリアの付形性も相まって、臼歯部の咬合面形態を付与するのにとても使いやすいです。咬合面形態の付与には、ほとんど#1を使用しています。

#1 フレックスフロー NT ユニバーサル



#2 フレックスフロー NT ストレート



#3 コンポジットレジン充填器 IPC



#4 コンポジットレジン充填器 OCP



ビューティフィル E ポステリアや MiCDインストゥルメントについて、ご要望はありませんか。

強い要望ではありませんが、ビューティフィル E ポステリアに関しては、健保適用外のCRという特長に合った形でもう少しシステム化されていると、なおよいと思います。フロアブルタイプ

でライニングして、ペーストタイプで充填する一連の流れになった自費診療用のものがあればうれしいです。MiCDインストゥルメントに関しては、使いやすいのですが、#1と#2の先端の細さが気になります。今のところ、曲がったことも折れたこともありませんが、落とさないように気をつけて扱わなければいけませんね。

ダイレクトボンディングを自費診療に組み入れようとお考えの方に、アドバイスはありますか。

新患の方から、「他の歯医者さんで、きちんと説明がないまま銀色の詰め物で治療されたので、白い詰め物にして欲しい。」というお話がありました。問診票にて保険診療を希望されたため、従来の保険診療の流れに沿ってメタルインレーを装着されたのだらうと思います。患者さまはできるだけ歯を残したい、白く美しい歯でいたいという希望をお持ちです。その潜在的な要望については、もしかすると歯科医師の方が感覚的に遅れているのかもしれない。


保険診療、自費診療を問わず、患者さまにはたくさんの方の選択肢をご提示して、患者さまが望む治療を選択していただける状態をつくるのが大切だと思います。その選択肢の中で、ダイレクトボンディングによる自費診療をご紹介します。「最小限の歯質の削除量で美しい歯を手に入れられる」と説明していただくとうよいと思います。

（P22のリーフレット「銀色の詰めものさよなら」もご活用ください。）

※GiomarとはS-PRGフィラーが配合された製品の総称です。

S-PRGフィラー

松風独自開発のフィラーです。口腔内環境の健全化に寄与する6種類のイオンが歯質へと徐放されます。

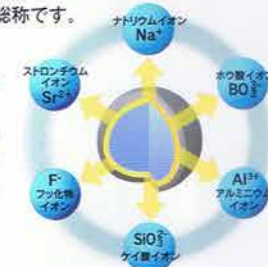

BEAUTIFIL E POSTERIOR / MiCD INSTRUMENT



ダイレクトボンディングの患者さま向け資料。この資料を待合室に置くことで、「この治療をしてください。」と患者さまから言われることが多いそうです。



おおくぼ歯科クリニックの皆さま

取材後記

スタッフの全てが女性というおおくぼ歯科クリニック。緊張しながら取材に伺いましたが、とてもアットホームで、男性でも気軽に来院できる雰囲気がありました。スタッフの採用基準は「学校を卒業して間もないこと」。経験も大事ですが、クリニックの理念に賛同し、同じ志をもって仕事に努めたいという理由だそうです。「休日はどのようにお過ごしですか?」と尋ねると、「趣味はとくになくて…ほとんどは勉強会に出席しています。」と、勉強熱心な大久保先生ですが、「あとは…愛猫と遊んだり、猫の食育セミナーに参加したりですかね(笑)。」と惜しみなく注がれる愛猫への愛情を垣間見ることができました。「これからは、カリエスフリーが当たり前という時代がやってくると思います。歯科医師が担う役割は、う蝕を治療する、う蝕や歯周病にならないようにする、ということだけではなく、これからは口腔機能や顎機能に関しても、歯科医院が担っていくように仕事の幅を広げたいと思っています。」と話してくださいました。患者さまからもスタッフからも愛される大久保先生の熱意を、取材の中からしっかりと伺うことができました。

★お使いいただいている製品



ビューティフィル E ポステリア
チップタイプ
【色調】5色 (SA0, S, A1, A2, A3, OT)
0.25g×10個入…¥4,000
※ベーシックセット…¥18,000



ビューティフィルチップ
ティスベンサー
…¥16,000



MiCDインストゥルメント キット
…¥25,800
（詳細はP6をご覧ください。）